



**NXT™ PELVIC/LUMBAR &
OPTIONAL LATERAL SUPPORTS INSTALLATION**

*GUIDE D'INSTALLATION POUR LES SUPPORTS
PELVIENS, LOMBAIRES ET LATÉRAUX*

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTION



NXT™ PELVIC/LUMBAR SUPPORTS & OPTIONAL LATERAL SUPPORTS

- The Pelvic-lumbar support pads can be uniquely positioned to provide optimal pelvic positioning and lumbar support. The supports come uninstalled, allowing them to be specifically fit to the person at the time of the back installation. Fit as shown between fabric and inner shell of backrest. Attach the Hook Velcro® on the front of the pelvic pad to the Loop Velcro strips on the cover.
- Where additional lateral support is required, optional lateral supports are available and provide additional lateral/hip support where needed. Fit pads between the fabric and the shell of the backrest.
- After positioning support pads, seal Velcro® closure, reposition cover on the backrest shell.




Pelvic Lumbar Pads



Lateral Support Pads

GUIDE D'INSTALLATION POUR LES SUPPORTS PELVIENS, LOMBAIRES ET LATÉRAUX

- *La position des coussins pelviens et lombaires peut être ajustée de manière à offrir un positionnement pelvien et un support lombaire optimaux. Les supports sont vendus non installés de manière à pouvoir être ajustés selon les spécificités de l'usager au moment de l'assemblage du dossier. Ils doivent être installés, tel qu'indiqué, entre le tissu et la paroi intérieure du dossier. Fixez l'avant du coussin pelvien au revêtement de la paroi grâce au Velcro®. Accrochez Velcro® à l'avant du coussin pelvien attaché à la cover.*
- *Les usagers qui ont besoin de soutien supplémentaire peuvent se procurer des supports latéraux optionnels. Ceux-ci offrent un appui additionnel au niveau des hanches, là où c'est nécessaire. Ils doivent être installés entre le tissu et la paroi intérieure du dossier.*
- *Après avoir positionné les coussinets d'appui additionnel de manière adéquate, fixez-les bien en place à l'aide du Velcro®, et replacez le revêtement du dossier.*

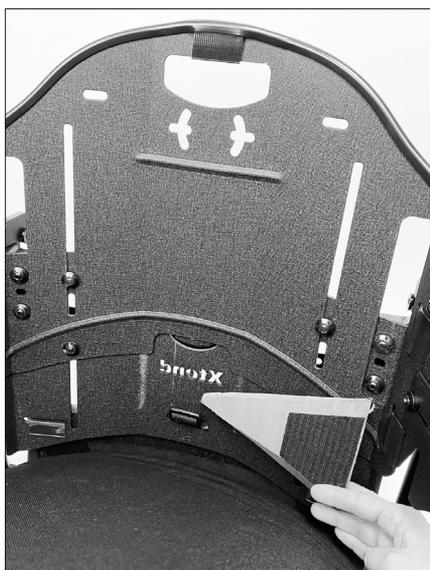

Insertions d'appoint pelviennes / lombaires



Insertions d'appoint latérales



Dynamic Health Care Solutions

MAIN OFFICE: T (866) 875-2877 • F (866) 875-2878

www.DynamicHCS.com



Dynamic Health Care Solutions
565 Rue J-Oswald-Forest
St-Roch-de-l'Achigan (QUEBEC) J0K 3H0 Canada
1-866-650-6555 | www.dynamichcs.com

Advena Limited | Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta