



NXT™ PRIVACY FLAP INSTALLATION
INSTALLATION DU RABAT D'INTIMITÉ NXT™

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTION




NXT™ PRIVACY FLAP INSTALLATION

INSTALLATION DU RABAT D'INTIMITÉ NXT™



The TOP of the Privacy Flap is identified by the tapered ends of the fabric and a notch.

Le côté SUPÉRIEUR du rabat d'intimité est reconnaissable à ses extrémités en pointe et à l'entaille dans le tissu.

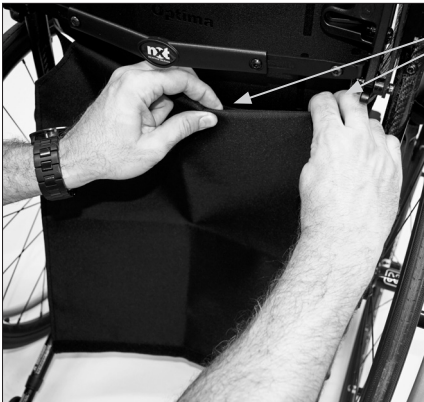

Insert the top end of the Privacy Flap over the edge of the back support cover at the lower rear of the back support.


There is Velcro® on both the Privacy Flap and the inside of the cover edge. This secures the flap to the back support.

Faites glisser le rabat d'intimité par-dessus le revêtement du dossier en insérant le bas du dossier à l'intérieur de l'extrémité supérieure du rabat d'intimité.

Le rabat d'intimité et le bord du dossier sont tous deux munis de bandes de Velcro® afin de fixer le rabat au dossier.


NXT™ PRIVACY FLAP INSTALLATION

INSTALLATION DU RABAT D'INTIMITÉ NXT™

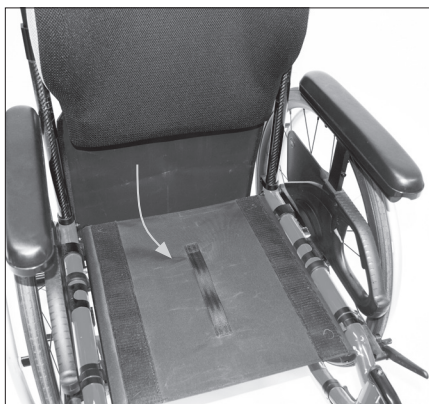

Bring the bottom of the Privacy Flap under the back support and place it on the seat sling of the wheelchair.

Tirez l'extrémité inférieure du rabat d'intimité sous le dossier de manière à ce qu'il repose sur l'assise du fauteuil.

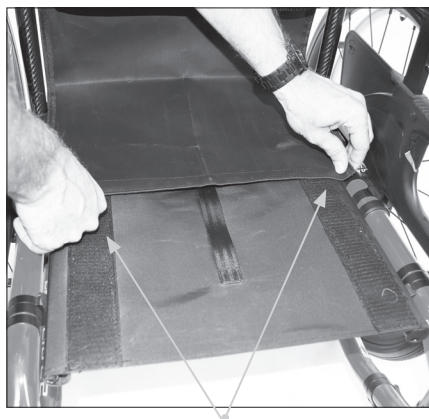

Secure the Privacy Flap on to the seat sling using the Velcro® strips. Make sure there is enough slack to accommodate placing the cushion back on the wheelchair.

Fixez le rabat d'intimité au siège à l'aide des bandes de Velcro®. Assurez-vous de fixer le rabat de manière suffisamment lâche pour pouvoir replacer le coussin sur le siège du fauteuil.



The Privacy Flap is now installed and the gap between the back and cushion has been concealed.

Le rabat d'intimité est maintenant installé, permettant de combler l'espace entre le dossier et le siège.



Dynamic Health Care Solutions

MAIN OFFICE: T (866) 875-2877 • F (866) 875-2878

www.DynamicHCS.com



Dynamic Health Care Solutions
565 Rue J-Oswald-Forest
St-Roch-de-l'Achigan (QUEBEC) J0K 3H0 Canada
1-866-650-6555 | www.dynamichcs.com



Advena Limited | Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta